

## Rychlé ošetření ihned po dentální hygieně

BlancOne® CLICK je rychlé bělení zubů prováděné po zubní hygieně.

Při tomto ošetření získáte při návštěvě dentální hygienistky za nízkou cenu a během pouhých 10 minut další plus navíc.

BlancOne® CLICK je určen jak pro podporu kompletního bělicího ošetření (Touch nebo Ultra), tak jako reklamní a marketingový nástroj pro ordinaci.

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### A) Příprava gelu

1. Z obou stříkaček (bělicí gel a aktivační gel) odstraňte uzávěry a pomocí závitového prvku luer lock je spojte.
2. Jemně zatlačte na píst jedné stříkačky a všechny gel vytlačte do druhé.
3. Nyní zatlačte na píst stříkačky s gelem a přemístěte ho prázdné stříkačky.
4. Operaci opakujte tak dlouho, dokud se oba dva gely (bělicí a aktivační) dokonale nepromíchají a nevytvoří homogenní gel.
5. Stříkačku s gelem oddělte od spojovacího prvku a nasadte aplikační hrot.


#### B) Příprava pacienta

1. Pacientovi vložte do úst rozvěrač BlancOne® s držákem jazyka a pod spodní a horní ret vložte tampony, aby se rty nenacházely v blízkosti ošetřované oblasti.
2. Kartáčkem odstraňte sliny; pokud chcete, můžete použít směs vody a pemzy. NEPOUŽÍVEJTE lešticí pasty ani produkty obsahující fluor. Opláchněte a nechte oschnout.
3. Pomocí barevné stupnice určete u pacienta výchozí odstín bílé.

#### C) Bělení zubů

1. Jemně zatlačte na píst stříkačky s bělicím gelem a naneste gel na povrch všech bělených zubů.
2. Modrým světlem aktivujte bělicí gel.

Po aktivování bude gel vypadat nafouknutý a plný vzduchu (bublinek), viz obrázek.

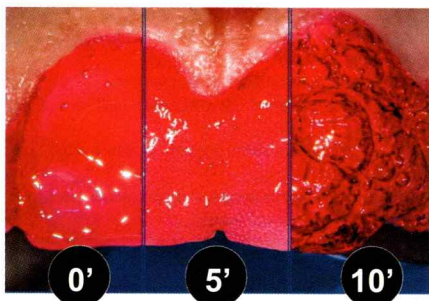

3. Bělicí gel odstraňte nahrubo bavlněnou tyčinkou, zbytek pak odsajte a proveďte oplach pomocí stříkačky se vzduchem/vodou.  
POZOR: Aktivovaný gel bude poměrně hustý. Pokud by se odsávací hubice zanesla, nasajte s dostatečným množstvím vody.  
POZNÁMKA: Dásně mohou na některých místech lehce zrudnout; tento efekt je ale dočasný a během hodiny pomine.

#### D) Ukončení ošetření

1. Pomocí barevné stupnice určete u pacienta konečný odstín bílé.
2. Odstraňte rozvěrač a nechte pacienta vypláchnout ústa.

#### Fotoaktivace gelu

Bělicí gely BlancOne® vyžadují vhodný světelný zdroj pro aktivaci fotochemické reakce.

Pro zajištění maximálního výsledku bělení doporučujeme používat lampu na bělení zubů BlancOne® ARCUS, která je vybavena 10 výkonnými 5W led světly a zajišťuje tak úplnou aktivaci gelu na obou zubních obloucích, včetně bočních sekcí, současně a při dodržení stanovených krátkých časů.

Hlavice lampy BlancOne® ARCUS se musí umístit kolmo k zubům do vzdálenosti 5-10 cm od úst, aby bylo zajištěno dobré větrání.

Při použití jiných lamp na bělení zubů by se mohla snížit účinnost ošetření, mohla by být zapotřebí delší doba nebo v některých případech by nemuselo dojít k aktivaci bělicího gelu.

#### DOPORUČENÉ DOBY AKTIVACE

Zařízení	Výkon	Typ aktivace	Doba
Lampy BlancOne® ARCUS	250 mW/cm <sup>2</sup>	současná na obou zubních obloucích	10 minut

#### UPOZORNĚNÍ PRO EVROPSKOU UNII

- Uvolní se 5,6 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
- Nepoužívejte u osob mladších 18 let.
- Určeno výhradně pro prodej specializovaným zubním lékařům.
- Určeno výhradně pro použití specializovanými zubními lékaři nebo pod jejich přímým dohledem, pokud bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před bělením je nutné provést zubní kontrolu.
- Účinek bělení není patrný na porcelánových korunkách a zubních náhradách.
- Po dobu minimálně 6 hodin po ošetření nepoužívejte tabákové výrobky, nepijte kávu a červené víno.
- Nepoužívejte pro ošetření těhotných žen. Při kojení konzultujte s lékařem.
- Vyvarujte se požití gelu. Zabraňte kontaktu s jinými tkáněmi než se zuby.
- Kyselé potraviny/šťávy mohou v případě konzumace okamžitě po bělení způsobovat citlivost.
- U osob s onemocněním parodontu může dojít k podráždění dásní.
- Produkty na bělení zubů uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaktu s kůží, sliznicemi a očima. Při kontaktu S OČIMA: oči po dobu několika minut pečlivě vyplachujte a kontaktujte lékaře. S KŮŽÍ/SLIZNICEMI: omyjte dostatečným množstvím vody. V případě podráždění kontaktujte lékaře.
- V případě požití malého množství není produkt škodlivý, v ostatních případech kontaktujte lékaře.
- Někteří pacienti mohou vnímat citlivost nebo podráždění dásní. Obecně se jedná o nezávažné a přechodné účinky, ale v některých případech si mohou vyžádat i ošetření zubním lékařem.